

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рециркулятор бактерицидный «СФЕРА 999/07» изготовлен и принят в полном соответствии протокола испытаний № ГТД/072020/7376 и признан годным для эксплуатации.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рециркулятор - 1 шт.  
Лампа - 1 шт.  
Вентилятор - 1 шт.  
Упаковка - 1 шт.  
Паспорт совмещен с гарантийным талоном - 1 шт.



УБИВАЕТ ДО 99,9%  
ВСЕХ БАКТЕРИЙ

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал корпуса	металл
Габаритные размеры	350*200*100 мм
Напряжение питания	220V/50 Гц
Мощность УФ-А	15 Вт
Длина кабеля	1,5 м
Площадь покрытия	40 м <sup>2</sup>
Тип лампы	LED UV-A
Эффективный ресурс работы ламп	30000 ч
Рекомендуемый объем помещения	до 80 м <sup>3</sup>
Длина волны преобладающего излучения	315 - 400 нм
Воздухо-пропускная способность	80 ± 5 м <sup>3</sup> /ч
Уровень шума	24 дБ
Степень защиты	IP20
Масса	2 кг
Вариант эксплуатации	напольный, настенный

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Рециркулятор «СФЕРА 999/07»

Наименование товара


Дата продажи

Подпись продавца

Печать

Рециркулятор  
бактерицидный  
СФЕРА 999/07

## ПАСПОРТ

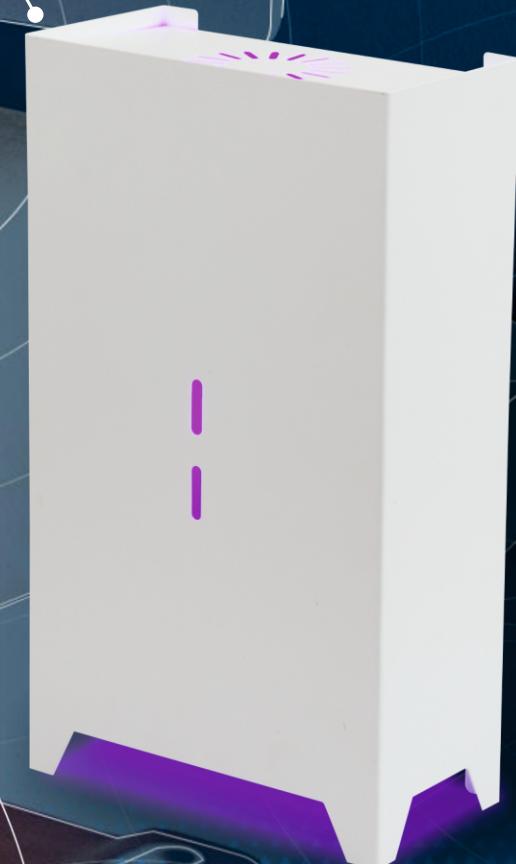

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство для борьбы со сложными вирусными эпидемиологическими ситуациями.

Обеззараживает воздушную среду при помощи, установленной УФ-лампы, бактерицидный поток от лампы распространяется в замкнутом пространстве рециркулятора через которое принудительно при помощи вентилятора прокачивается воздух из помещения.

Обеззараживание воздуха происходит благодаря работе светодиодной бактерицидной УФ-ламп, с длиной волны ультрафиолетового излучения от 315-до 400нм., которые способны очистить воздух от болезнетворных бактерий, вирусов и грибов. УФ-излучение в диапазоне длин волн около 315-400 нм хорошо проникает сквозь стенку клетки микроорганизма и поглощается ДНК микроорганизмов, вызывая нарушение её структуры. В результате прекращается процесс воспроизведения микроорганизмов.

Рециркулятор может применяться в домашних и амбулаторных условиях, школах, детских садах, лечебных учреждениях, офисных, производственных и складских помещениях, а также ресторанах, кафе, парикмахерских, салонов красоты, фитнес-центров.

## БЕСШУМНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Воздух из помещения прокачивается через рециркуляционный модуль обеззараживания благодаря установленному внутри вентилятору. Система прокачки воздуха устроена таким образом, чтобы потоки не смешивались, сопла устройства можно направлять в разные стороны, за счет такого расположения достигается оптимальная циркуляция воздуха в помещении, позволяющая постоянно поддерживать чистоту воздушной атмосферы в помещении.

**Одного устройства достаточно для поддержания чистой атмосферы в помещении площадью до 40м<sup>2</sup>.**

## ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

Готовый к установке и работе обеззаражающий прибор, ничего больше не потребуется, кроме как подключить устройство к рабочей сети с напряжением 220V.

## ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым включением прибора ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя.

Не рекомендуется непрерывная эксплуатация рециркулятора более чем 5 часов.

Запрещается включать прибор в питающую электросеть при снятой крышке корпуса.

Уход за рециркулятором необходимо осуществлять при выключенном из розетки вилки шнуром питания.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ С РАБОТАЮЩИМ РЕЦИРКУЛЯТОРОМ СМОТРЕТЬ В ОКНО ВЕНТИЛЯТОРА! НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К РАБОТАЮЩЕМУ ПРИБОРУ!**

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Прибор в упаковке изготовителя должен храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5°C до 40°C и относительной влажности не более 80% при 25°C при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных компонентов.

Прибор в упаковке изготовителя допускается транспортировать любым видом крытых транспортных средств.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия «Рециркулятор бактерицидный СФЕРА 999/07» требованиям технических условий ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011.

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

При отсутствии в паспорте даты продажи или печати торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты изготовления.

При возникновении поломки в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует сервисный ремонт. Рециркулятор принимается на гарантийный ремонт только с предъявлением паспорта на прибор.

Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные нарушением правил эксплуатации, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы, в том числе:

- механическим повреждением изделия в результате удара либо применения чрезвычайной силы;
- повреждением изделия в результате воздействия горячих предметов или жидкостей;
- любым посторонним вмешательством в конструкцию изделия.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Эффективное решение в борьбе с вирусами



Режим работы в присутствии людей



УФ-лампы без образования озона



Компактные размеры



Безопасно для зрения




Высокая эффективность

100



50

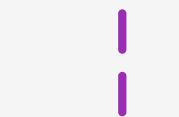

200

**ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** Zhangsham Guzhen Universal lighting Fittings Factory. Местонахождение и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Room W10, Building 3, Guyi Accessories city, Guyi station, Guzhen Zhongshan, Guangdong.